

GETINGE 600-SERIEN TOPPMATADE SPOLDESINFEKTORER



Always with you

FÖREDRAR DU ANVÄNDARVÄNLIGHET? OPTIMAL TEKNIK? ELLER VILL DU HA BÅDE OCH...

Att utveckla desinfektionsutrustning som både är lätt att använda och tekniskt fulländad är svårare än det låter. För oss på Geringe har det tagit en så där 70 år och tiotusentals uppdrag ute bland världens vård- och op-avdelningar för att lyckas! Idag är vi världsledare på området och det senaste talande beviset är Geringe 600-serien – en samling ovanligt lättanvända spoldesinfektorer med överlägsen teknik för rengöring och desinfektion.

På följande sidor är du välkommen att läsa mer om de sinnrika detaljerna.

All flusher-disinfectors i Geringes 600-serie är toppmatade och kan användas i två olika syften:

- För tömning (traditionell utslagsback med randspolning)
- För rengöring och desinfektion.

På så sätt slipper man investera i en separat tömningsenhet i desinfektionsrummet, samtidigt som man sparar mycket plats. Hela processen – från tömning till rengöring och desinfektion – tar endast 4–7 minuter.

Lätta att arbeta med

De toppmatade spoldesinfektorerna i 600-serien är designade med lägre framkant än bakkant. Locket blir därmed sluttande och öppnas uppåt, vilket i sin tur gör det enkelt att lasta, tömma och att överblicka godset.

Fotpedal ingår i grundpriset!

För att göra godshanteringarna ännu bekvämare och undvika kontaminering av rena händer, har hela 600-serien en fotpedalför locköppning och -stängning som standard. Även det vanligaste programmet på avdelningen startas via fotpedalen. Ett tryck på fotpedalen öppnar locket helt.


Superior cleaning and disinfection

Med 600-serien går Geringe steget längre än någon annan när det gäller effektiv rengöring och desinfektion. Det svårt nedsmutsade godset rengörs med hjälp av roterande munstycken och ett effektivt spolsystem. Därefter värmedesinfekteras det genom att ånga tillförs via samtliga munstycken, direkt in i varje enskilt diskgod. På så sätt blir


även den invändiga desinfektionen i flaskor och dylikt säkerställd. Det är dock inte bara godset som får en överlägsen desinfektion i Geringes 600-maskiner. Även maskinernas kammare, rör, dysor etc, desinfekteras efter varje process – Pipe System Disinfection (PSD). Därmed kan inga rester stanna kvar i maskinen mellan processerna och hygien blir den allra bästa.

Automatisk torkning

När rengörings-/desinfektionsprocessen är avslutad, öppnas locket automatiskt cirka tio centimeter. Detta påskyndar torkningen och gör godset torrt och svalt på kort tid. Den gröna signalen samt det gläntade locket är tydliga signaler på att rent gods finns tillgängligt i kammaren.

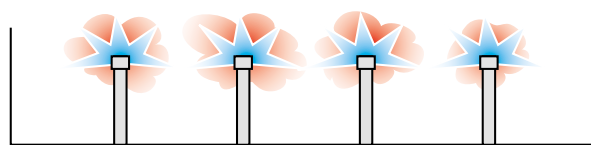

I Geringes 600-serie tillförs ånga via varje enskilt spolmunstycke, direkt in i varje enskilt diskgod.

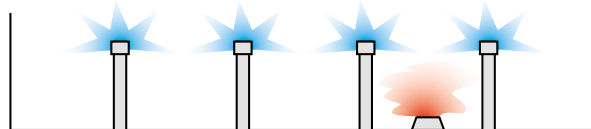

Många spoldesinfektorer har endast ett centralmunstycke för ångan, som då själv får söka sig in i flaskor och dylikt.



Fotpedal ingår i grundpriset.



Locköppning efter tryck på fotpedalen.



Automatiskt torkningsläge.

Sluttande lock

Gör det enkelt att lasta, tömma och att överblicka godset.

Noggrann rengöring

Perfekt resultat garanteras genom en kombination av en niversalhållare och rengöringsmunstycken: ett roterande injektormunstycke, 6 fasta munstycken och 3 valbara randspolningsmunstycken.

Helpressad kammare

Minimerar risken för att smutsrester fastnar i fogar och fickor.

Traditionell utslagsback

med manuell rand-spolning.

Överlägsen desinfektion

Ånga sprutas in genom samtliga munstycken och säkerställer desinfektion även på godsets insidor.



Spoldesinfektor 600-serien

Kammarvolym L	70
Kammarhöjd mm	400
Kammarbredd mm	465
Kammardjup mm	400

Vägghängd eller på ben

Rejält med utrymme under maskinen gör det lättstädad.


Fotpedal = standard!

Manövrerar locket och omöjliggör kontaminering av rena händer.



TILLVALEN SOM GÖR DIN 600-MASKIN ÄNNU MER ANVÄNDARVÄNLIG:

Spoldesinfektorerna i 600-serien är som standard utrustade med universalhållare och två stycken injektorrör. Därutöver kan du välja till följande:

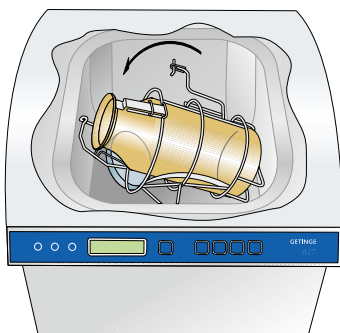

Tömmer automatiskt dina sugflaskor, bäcken etc. För att undvika stänk och aerosoler, töms godset först när locket stängts (sker automatiskt).



Hållare för sugflaska
2–5 liter, art.nr 500 44 00-00.



Hållare för bäcken & handfat
art.nr 499 95 72-00.



Extra hållare för sugflaska (Egnell)
0,7 liter, art.nr 500 77 200. Passar
i hållare 500 07 72-00.

TILLVAL Automatic emptying

Botteninsats	Art. nr 500 11 39-00
Insatskorg	Art. nr 499 96 10-00
Instrumentfjäder	Art. nr 499 11 16-00
Extra injektorrör	Art. nr 500 06 33-00
Hållare för sugflaska 2-5 liter	Art. nr 500 44 00-00
Adapter för små sugflaskor 0.7/1.2/2.0 liter, Egnell, Mediada och Meddela Passar i hållare	Art. nr 500 07 72-00 Art. nr 500 44 00-00
Adapter för små sugflaskor 0.25-0.5 liter, Meddela, FMS Passar i hållare	Art. nr 500 05 16-00 Art. nr 500 44 00-00
Hållare till ett runt bäcken	Art. nr 499 95 72-00
Hållare till ett runt bäcken och en urinflaska	Art. nr 501 14 05-00

TILLVAL Manuell tömning

Adapter för små urinflaskor Passar i hållare	Art. nr 500 26 57-00 Art. nr 501 14 05-00
Adapter för 2-liters sugflaskor/mätkannor Passar i hållare	Art. nr 501 13 70-00 Art. nr 501 14 05-00
Hållare för tre urinflaskor	Art. nr 499 95 71-00
Insatskorg	Art. nr 499 96 10-00
Instrumentfjäder	Art. nr 499 11 16-00
Extra injektorrör	Art. nr 500 06 33-00
Adapter för sugflaska	Art. nr 499 99 99-00

GETINGE 600- SERIEN PÅ VÅRD- AVDELNINGAR

Några lastalternativ

Universalhållare

Ingår som standard vid manuell tömning.



GETINGE 600-SERIEN PÅ OP-AVDELNINGAR




Några lastalternativ



Universalhållare
Ingår i basutrustningen.



Hållare för sugflaska
Med vändningsfunktion, art.nr 500 44 00-00.

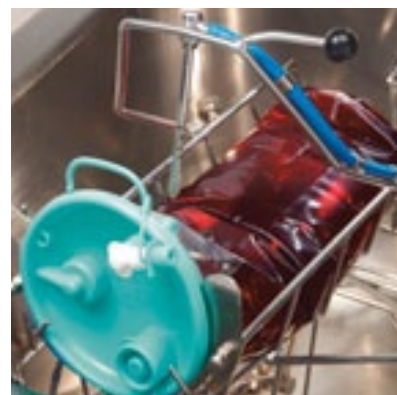

Hållare för sugpåse
Med påsförstörarfunktion.



KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL

Gefinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetenskapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och global närvaro. Gefinge – Always with you.

Gefinge Infection Control AB

P O Box 69
SE-310 44 Gefinge
SWEDEN
Phone: +46 35 15 55 00
Fax: +46 35 18 14 50

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. **GETINGE** tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso- och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. **MAQUET** är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.