

**GETINGE FD1800  
SPYLEDEKONTAMINATOR**



Always with you



P 82  
NORMAL PROGRAM



GETINGE  
GETINGE GROUP



GETINGE  
GETINGE GROUP

## VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING

Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en velkjent spyledekontaminator i sykehus og pleiehjem, og den pålitelige og effektive maskinen brukes i vaskerom over hele verden.

I tillegg til at den sikrer effektiv og kostnadseffektiv rengjøring og desinfeksjon av beholdere med avføring fra mennesker, er Getinge FD1800 konstruert for å tilby alternativer og funksjoner, som den føleraktiverte døren, som gir enda bedre støtte til effektive rutiner for å bekjempe krysskontaminering.

Getinge FD1800 er en frontmatet spyledekontaminator med utmerket ytelse ved tømning, rengjøring og termisk desinfeksjon av bekkene, urinflasker og bøtter. Damp leveres gjennom kammerkonfigurasjonen med faste og roterende dyser, og gir resultater som oppfyller de strenge kravene til rengjøring og desinfeksjon i den europeiske standarden for spyledesinfektorer, EN ISO 15883.

Getinge FD1800 er oppgradert i tråd med Getinges prinsipp om kontinuerlig forbedring av sine produkter og tjenester. Resultatet er en maskin som kan spille en enda viktigere rolle i driften, ved at den tilbyr nye alternativer og muligheter. Getinge FD1800 kontrollerer og styrer prosessene, forbedrer arbeidsmiljøet og effektiviteten, og tar desinfeksjon til et nytt nivå som takler selv de tøffeste mikroorganismer.

## MER VALGFRIHET BETYR ...

Getinge FD1800 er tilgjengelig i en rekke modeller og materialer, som kan dekke behovene i alle vaskerom. Prosesskontroll og effektivitet er forbedret med nye funksjoner og alternativer, uten at det går ut over kostnadseffektiviteten eller miljøet.



### Fleksibel utforming

Den nye standardinnkapslingen er fremstilt i fargerik polymer-materiale, som skaper en tiltalende, moderne design. Alle modeller er utstyrt med kammer i rustfritt stål. Getinge FD1800 er også tilgjengelig i rustfritt stål ved behov.



### Tørkevitte som standard

Beholderne blir raskt tørket og kjølt ned på en mest mulig hygienisk måte med HEPA-filtrert (H13) luft. Når syklusen er slutt, leveres tørre og nedkjølte beholdere, noe som bedrer arbeidsmiljøet og sikkerheten for personalet.



### Automatisk dørfunksjon

For å støtte hygienerutiner uten berøring, har Getinge FD1800 mulighet for automatisk dør, som aktiveres av en infrarød føler. En fotpedal kan også velges som automatisk døråpner.




### A<sub>0</sub>-innstilling og kontroll

A<sub>0</sub>-verdien kan stilles inn på 60 eller 600, for å bekjempe selv de vanskeligste mikroorganismer. Desinfeksjonsfasen kan styres etter temperatur eller den valgte A<sub>0</sub>-verdien, for å redusere syklustiden ytterligere.



## ... STØRRE FLEKSIBILITET

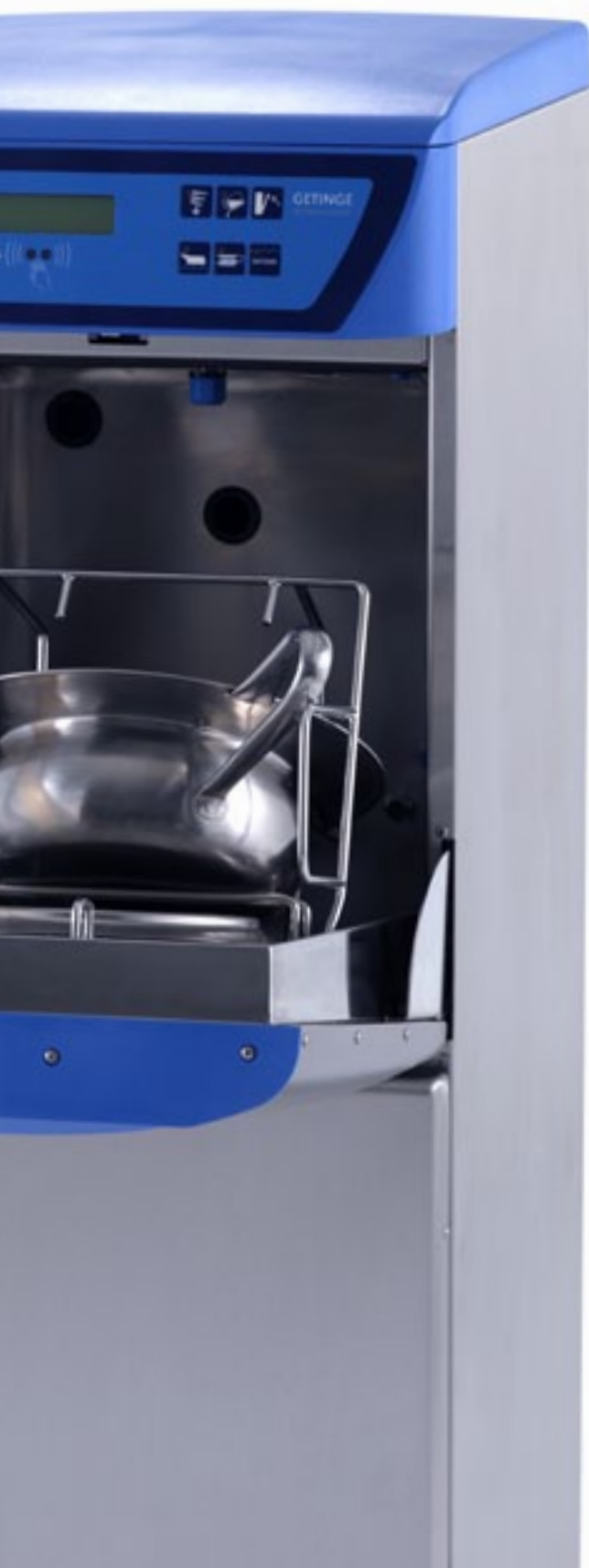

### **Sekvensdisplay med gjenstående tid**

Displayet viser gjenstående tidssekvens i intervaller på ti sekunder, slik at personalet kan kontrollere fremgangen i syklusen og planlegge arbeidsflyten mer effektivt ved at man bruker mindre tid på å vente på at prosessen skal bli ferdig.

### **Prosesslogg**

Mange helseinstitusjoner beveger seg mot større åpenhet, med detaljerte logger over desinfeksjonsoperasjoner. Med styresystemet PACS 350 har Getinge FD1800 muligheten til å registrere og spore prosesser via en skriver eller en USB-enhet.

### **Miljøvennlig drift**

Eksepsjonelt lavt forbruk av vann, strøm og kjemikalier reduserer den totale miljøpåvirkningen og holder driftskostnadene på et minimum. I tillegg bidrar lavt varmeutslipp og lavt støynivå til bedre arbeidsmiljø.

### **Valgfri IP44-klassifisering**

Med økt bevissthet rundt infeksjonskontroll i sykehusavdelinger over hele verden, kreves det en spyledesinfektor i et tilliggende badrom i mange pasientrom. IP44-klassifisering anbefales for sikker installasjon i våtrom.

### **Rørsystemdesinfeksjon (PSD)**

Rask desinfeksjon gjennom alle de faste og roterende dysene gir også en unik fordel, fordi hele rør- og dysesystemet desinfiseres i hver syklus, noe som eliminerer faren for kontaminasjon.

## SKAPE EN KOMPLETT LØSNING

Getinge FD1800 spiller en sentral rolle i et effektivt vaskerom, men er bare ett element i effektiv infeksjonskontroll. Getinge kan hjelpe deg å bygge opp et optimalt vaskerom og opprette en total strategi for infeksjonskontroll.

Etter at spyledesinfektor er valgt, kan de følgende tre trinnene brukes som en veiledning for å skape en komplett løsning:

### TRINN 1: Velge riktig holder

Universalholderen passer for de fleste vanlige beholdere. En lang rekke holdere for andre typer gods er også tilgjengelig. Disse holderne kan håndtere en rekke typer bekken, samt bøtter og urinflasker. Optimal ytelse kan bare oppnås ved å velge den ideelle holderen fra det omfattende standardutvalget som tilbys av Getinge.

### TRINN 2: Velge tilbehør

Getinge tilbyr også en rekke nyttige tilbehør, for eksempel et unikt, anatomisk utformet bekken med lokk. Getinges kjemikalier, et optimalisert skylle- og avkalkingsmiddel og et svært effektivt vaskemiddel, er utviklet for å oppfylle de strengeste prosesskrav.

### STEP 3: Utformet et komplett vaskerom

Getinge tar hensyn til alle aspekter ved vaskerommet, og leverer omfattende støtte fra opplæring i gode hygienerutiner til råd om romlayout og valg av utstyr. Getinge tilbyr også et komplett møbelkonsept for vaskerommet, som bidrar til å skape et hygienisk og sikkert arbeidsmiljø for kunden.



Urinflaske og bekken med lokk



Tre urinflasker



Bøtte med lokk

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Getinge FD1800, frittstående modeller i rustfritt stål eller polymer

### Getinge FD1800 frittstående modeller

Vekt	100 kg
Bredde	450 mm
Dybde	580 mm
Høyde	1320 mm
Avløpskopling vegg / gulv	Ø 110 mm
vegg / gulv	Ø 90 mm
Strømforbruk	0,16 kWh/syklus
Maks. utvendig temperatur	40 °C
Støynivå	53 dB (A) i henhold til EN ISO 3747:2000
Vannkoplinger – kaldt og varmt vann	
Vann	15 mm
Trykk	1-8 Bar (14-116 PSI)
Vannmengde	>0,3 l/s
Vannforbruk	Økonomiprogram 11 liter/syklus ±10 % Normalprogram 18 liter/syklus ±10 % Intensivprogram 25 liter/syklus ±10 %
Godkjenninger	MDD 93/42/EEC. Tredjepartssertifikat for EN ISO 15883-1 og 15883-3

Mål og spesifikasjoner for skap som passer til Getinge FD1800 er tilgjengelige på forespørsel.



### KOMPLETTE LØSNINGER FOR INFEKSJONSKONTROLL

Getinge er verdens ledende leverandør av løsninger for effektiv rengjøring, desinfisering og sterilisering innen helsesektoren og farmasøytisk industri. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å gi bedre pleie med lavere kostnader. Vi gjør dette ved å tilby gjennomtenkte og tilpassede løsninger. Dette betyr at vi er med kunden hele veien fra arkitektonisk planlegging og utdanning til sporbarhet og support – med komplette løsninger, langsiktig engasjement og global tilstedeværelse. Getinge – Always with you.

#### Getinge Norge AS

Ryenstubben 2

0679 Oslo

NORGE

Telefon: +47 23 03 52 00

Telefax: +47 23 03 52 01

# GETINGE

GETINGE GROUP

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. **GETINGE** leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. **MAQUET** spesialiserte seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer og intensivavdelinger.